

## 1. CARACTERÍSTICAS

A seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual constitui dos seguintes componentes com as respectivas matérias-primas básicas:

1. Cilindro: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno (PP), translúcido, atóxico e inerte.
2. Haste: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno (PP) natural, atóxico e inerte.
3. Pistão: Componente injetado em borracha termoplástica ou borracha vulcanizada, ambas **isentas de látex**.

**Nota: Produto fabricado conforme requisitos normativos e legais aplicáveis.**

## 2. MEDIDAS / CALIBRES

- Seringa 1 mL – Bicos: Luer Slip/Lock, com/sem agulha.  
Seringa 3 mL – Bicos: Luer Slip/Lock, com/sem agulha.  
Seringa 5 mL – Bicos: Luer Slip/Lock, com/sem agulha.  
Seringa 10 mL – Bicos: Luer Slip/Lock, com/sem agulha.  
Seringa 20 mL – Bicos: Luer Slip/Lock, com/sem agulha.  
Seringa 60 mL – Bicos: Luer Slip/Lock, com/sem agulha. (Este calibre contempla 50 mL)



## 3. REGISTROS MS-ANVISA

- Seringa sem agulha e sem protetor de segurança: **80026180002**
- Seringa com agulha e sem protetor de segurança: **80026180014**
- Seringa sem agulha e com protetor de segurança: **80026180054**
- Seringa com agulha e com protetor de segurança: **80026180050**

## 4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

- Estéril - embalado individualmente (blister) em papel grau cirúrgico, com código de barras.

## 5. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Óxido de Etileno.

## 6. INDICAÇÃO

Seringa Hipodérmica de Uso Único para uso Manual é indicada para:

- **Aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluidos.**


Indicações de tipo de bico Luer Slip em seringas 10 mL e 20 mL:

- O **Bico Luer Slip Lateral** é melhor posicionado para dosagem de medicamentos e penetração na pele.
- O **Bico Luer Slip Central** é mais indicado para utilização em procedimentos laboratoriais.

Obs.: A fixação com agulha é igual nos dois tipos de bico.

## 7. INSTRUÇÕES DE USO

- a) Verificar a integridade do produto antes do uso;
- b) Destacar a unidade do produto da cartela;

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>	Documento N°: FTP-004
	<b>SERINGA HIPODÉRMICA SR</b>	Revisão N°: 01
		Data: 25 Fev. 2017
		Pág.: 2 de 2

- c) Abrir a embalagem através da técnica asséptica (sempre através da pétala);
- d) Conectar a agulha ao bico da seringa, realizando uma leve torção rotacional até que a agulha fique travada;
- e) Utilizar a seringa conforme técnica adequada para administração de medicamentos ou coletas de fluidos orgânicos;
- f) Após a utilização descartar em recipiente adequado para perfuro cortantes;
- g) Insira o canhão no cone da Seringa e faça um movimento de rotação ½ volta;
- h) Realize o procedimento normal de uso da seringa.

## 8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Produto de uso único. Descartar após o uso.
- O descarte do produto deve seguir os critérios de biossegurança.
- Verifique a integridade da embalagem, não utilize se a mesma estiver violada ou fora do prazo de validade. Abrir a embalagem somente no momento de sua utilização, em condições assépticas. Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.

## 9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, à temperatura ambiente em local seco e limpo.

## 10. DESCRIÇÃO COMERCIAL

Seringa hipodérmica, de uso único, estéril com capacidade para (calibre), confeccionada em polipropileno (polímero) transparente, não prejudicial à saúde, isenta de látex, com bico tipo luer slip (ou luer lock), capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com gravação indelével. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade.

Calibre	Divisões	Subdivisões
1 mL	0,1 mL	0,01 mL
3 mL	0,5 mL	0,1 mL
5 mL	0,5 mL	0,1 mL
10 mL	1,0 mL	0,2 mL
20 mL	5,0 mL	1,0 mL
60 mL	10,0 mL	1,0 mL / 2,0 mL

## 11. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 12. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 13. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.  
 Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores  
 CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil  
 CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2  
 Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416  
 E-mail: [vendas@seringasr.com.br](mailto:vendas@seringasr.com.br) / [qualidade@seringasr.com.br](mailto:qualidade@seringasr.com.br)  
 FTP disponível em: <http://www.seringasr.com.br/new-site/images/pdf/FTP/FTP-004.pdf>