

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>	Documento N°: FTP-008
	<b>SERINGA CRISTAL - POLICARBONATO</b>	Revisão N°: 01
		Data: 14 Mar. 2017
		Pág.: 1 de 2

## 1. CARACTERÍSTICAS

A Seringa Cristal policarbonato SR é constituída dos seguintes componentes com as respectivas matérias-primas básicas:

1. **CILINDRO:** Componente injetado termoplasticamente em Policarbonato, translúcido, atóxico e inerte.
2. **HASTE:** Componente injetado termoplasticamente em Polipropileno PP natural adicionado de pigmento branco, atóxico e inerte.
3. **PISTÃO:** Componente injetado em borracha termoplástica ou borracha vulcanizada, ambas isentas de látex.
4. **CAP ou Tampa do bico da seringa:** Componente injetado termoplasticamente em polipropileno PP natural, adicionado de pigmento de coloração azul.

**Nota: Produto fabricado conforme requisitos normativos e legais aplicáveis.**



## 2. MEDIDAS/ CALIBRES

Seringa 1mL – Bico Luer Lock, com/sem agulha.

## 3. REGISTRO MS-ANVISA

- Seringa Cristal-Plicarbonato: **80026180057**.

## 4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Produto estéril e embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com código de barras.

## 5. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Óxido de Etileno.

## 6. INDICAÇÃO


Seringa Hipodérmica Cristal Policarbonato é indicada para: **aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluidos**.

## 7. INSTRUÇÕES DE USO

- a) Verificar a integridade do produto antes do uso;
- b) Destacar a unidade do produto da cartela;
- c) Abrir a embalagem através da técnica asséptica (sempre através da pétala);
- d) Conectar a agulha ao bico da seringa, realizando uma leve torção rotacional até que a agulha fique travada;
- e) Utilizar a seringa conforme técnica adequada para administração de medicamentos ou coletas de fluidos orgânicos;
- f) Após a utilização descartar em recipiente adequado para perfuro cortantes.

## 8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Produto de uso único. Descartar após o uso;
- O descarte do produto deve seguir os critérios de biossegurança;
- Verifique a integridade da embalagem, não utilize se a mesma estiver violada ou fora do prazo de validade. Abrir a embalagem somente no momento de sua utilização, em condições assépticas. Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>	Documento Nº: FTP-008
	<b>SERINGA CRISTAL - POLICARBONATO</b>	Revisão Nº: 01
		Data: 14 Mar. 2017
		Pág.: 2 de 2

## 9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, a temperatura ambiente em local seco e limpo.

## 10. DESCRIÇÃO COMERCIAL

### Seringa Hipodérmica Cristal Policarbonato

Seringa hipodérmica, de uso único, estéril com capacidade para 1mL, com cilindro confeccionado em policarbonato transparente, não prejudicial à saúde, isento de latex, com bico tipo luer lock, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com gravação indelével. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confere estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade.

## 11. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 12. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 13. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.  
 Av.Torquato Tapajós nº 2475 – Flores  
 CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil  
 CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2  
 Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416  
 E-mail: [vendas@seringasr.com.br](mailto:vendas@seringasr.com.br) / [qualidade@seringasr.com.br](mailto:qualidade@seringasr.com.br)  
 FTP disponível em: <http://www.seringasr.com.br/new-site/images/pdf/FTP/FTP-008.pdf>