

|   |                                 |                       |
|---|---------------------------------|-----------------------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b> | Documento N°: FTP-009 |
|   | <b>CLAMP UMBILICAL</b>          | Revisão N°: 01        |
|   |                                 | Data: 14 Mar. 2017    |
|   |                                 | Pág.: 1 de 2          |

## 1. CARACTERÍSTICAS

O clamp umbilical constitui das respectivas matérias-primas básicas:

1. Componente injetado termoplasticamente em Resina Poliacetal, de coloração branca.
2. Com formato e sistema denteado tipo pinça em **V**, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamento quando em uso, apresentando um sistema de travamento e laço definitivo com fecho plástico inviolável.



## 2. MEDIDAS / CALIBRES

Modelo único.

## 3. REGISTRO MS-ANVISA

- Clamp umbilical: **80026189005**

## 4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Produto estéril e embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com código de barras.

## 5. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Óxido de Etileno.

## 6. INDICAÇÃO

Clamp Umbilical é indicado para **Ligadura ou para prender o cordão umbilical de Recém-Nascidos.**

## 7. INSTRUÇÕES DE USO

1. Retirar o produto de sua embalagem original, em condições assépticas.
2. Introduzir o cordão umbilical centralizando-o dentro do Clamp Umbilical.
3. Manter uma distância do recém-nascido, em seguida fechar o Clamp Umbilical, travando-o.
4. Cortar o cordão umbilical a uma distância da face externa do Clamp Umbilical em relação ao bebê.
5. Certificar-se que não há nenhum sangramento pelo cordão umbilical.
6. Após o uso, descartar em local apropriado.

## 8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Produto de uso único. Descartar após o uso;
- O descarte do produto deve seguir os critérios de biossegurança;
- Verifique a integridade da embalagem, não utilize se a mesma estiver violada ou fora do prazo de validade. Abrir a embalagem somente no momento de sua utilização, em condições assépticas. Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.

## 9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, a temperatura ambiente em local seco e limpo.

|   |                                 |                       |
|---|---------------------------------|-----------------------|
|  <p><b>SALDANHA RODRIGUES LTDA.</b><br/>Qualidade e tecnologia em suas mãos.</p> | <b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b> | Documento N°: FTP-009 |
|   | <b>CLAMP UMBILICAL</b>          | Revisão N°: 01        |
|   |                                 | Data: 14 Mar. 2017    |
|   |                                 | Pág.: 2 de 2          |

## 10. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 11. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 12. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.

Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores

CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil

CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2

Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416

E-mail: [vendas@seringasr.com.br](mailto:vendas@seringasr.com.br) / [qualidade@seringasr.com.br](mailto:qualidade@seringasr.com.br)

FTP disponível em: <http://www.seringasr.com.br/new-site/images/pdf/FTP/FTP-009.pdf>