
	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Documento N°: FTP-012
	EPIFLEX SR	Revisão N°: 01
		Data: 24 Mai. 2017
		Pág.: 1 de 1

1. CARACTERÍSTICAS

O Epiflex é injetado termoplásticamente em polipropileno ou polietileno com pigmentação em diversas cores.

2. MEDIDAS / CALIBRES

Modelo disponível nas cores: verde, azul, amarelo e transparente.

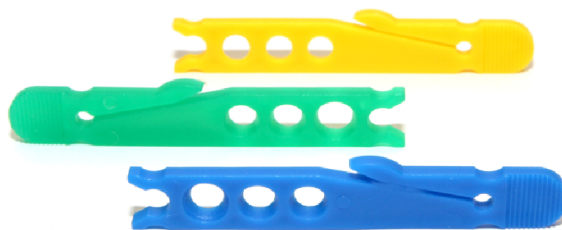

3. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Acompanha a seringa ou agulha no blister ou pode ser adquirido separadamente de forma avulsa.

4. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Não estéril.

5. INDICAÇÃO

O Epiflex SR é um dispositivo de segurança simples, de fácil manuseio e muito seguro. Auxilia no manuseio de agulhas hipodérmicas e protege o profissional de acidentes com picadas de agulhas, fabricado conforme orientações da NR32.

Nota: O Epiflex é utilizado em agulhas hipodérmicas, mas é considerado um acessório e por isso não possui registro na ANVISA.

6. INSTRUÇÕES DE USO

1. Segure o EPIFLEX na base antiderrapante, escolha o orifício que melhor encaixa ao protetor da agulha e empurre até prender o protetor com firmeza.
2. Após o encaixe, retire o protetor da agulha com um movimento reto e para frente. Prenda o EPIFLEX no jaleco ou simplesmente o solte se tiver preso ao seu pescoço por um cordão ou elástico.
3. Após o uso da agulha, segure o EPIFLEX na base antiderrapante e proteja a agulha com o protetor até ouvir um “click” que indica que está travado e não oferece mais risco.
4. Para descartar a agulha e a seringa, apoie a ponta do protetor em uma superfície rígida, pressione o EPIFLEX para baixo, de maneira que deslize pelo protetor e fique frouxo. Descarte o material em local apropriado.

7. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade do produto antes do uso.

8. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto a temperatura ambiente em local seco e limpo.

9. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

10. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

11. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.
 Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores
 CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil
 CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2
 Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416
 E-mail: vendas@seringasr.com.br / qualidade@seringasr.com.br
 FTP disponível em: <http://seringasr.com.br/new-site/images/pdf/FTP/FTP-012.pdf>