

|   |                                 |                        |
|---|---------------------------------|------------------------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b> | Documento Nº: FTP- 015 |
|   | <b>SERINGA CATETER</b>          | Revisão Nº: 01         |
|   |                                 | Data: 22 Mar. 2017     |
|   |                                 | Pág.: 1 de 2           |

## 1. CARACTERÍSTICAS

A seringa cateter montada constitui dos seguintes componentes, com as respectivas matérias-primas básicas:

- PISTÃO:** Componente injetado em borracha termoplástica ou borracha vulcanizada, ambas **isentas de látex**.
- CILINDRO:** Componente injetado termoplasticamente em Polipropileno PP natural, transparente.
- HASTE:** Componente injetado termoplasticamente em Polipropileno PP natural ou Polietileno PE.
- CAP ou Tampa do bico da seringa:** Componente injetado termoplasticamente em Polipropileno PP natural, adicionado de Pigmento, de forma a apresentar a coloração azul translúcido.

**Nota: Produto fabricado conforme requisitos normativos e legais aplicáveis.**

## 2. MEDIDAS / CALIBRES

Seringa 60mL Cateter

## 3. REGISTROS MS-ANVISA

- Seringa cateter: **80026180038**

## 4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Estéril - embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com código de barras.

## 5. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Óxido de Etileno.

## 6. INDICAÇÃO

Seringa é indicada para: **aspiração e administração de volumes líquidos, soluções e alimentação oral/enteral.**


## 7. INSTRUÇÕES DE USO

- Verificar a integridade do produto antes do uso.
- Destacar a unidade do produto da cartela.
- Abrir a embalagem através da técnica asséptica (sempre através da pétala).
- Realizar a lubrificação do cilindro, movimentando o êmbolo suavemente.
- Aspirar a solução/dieta enteral com a seringa e conectar a seringa na sonda;
- Lentamente, empurrar o êmbolo da seringa, para que aos poucos a dieta seja infundida.
- Repetir a operação até o término da dieta.
- Aspirar 20 mL de água com a seringa e injetar na sonda para limpá-la internamente.
- Tampar a sonda e descartar a seringa e a tampa em recipiente apropriado e identificado para esse fim.

## 8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Produto de uso único. Descartar após o uso.
- O descarte do produto deve seguir os critérios de biossegurança.
- Verifique a integridade da embalagem, não utilize se a mesma estiver violada ou fora do prazo de validade. Abrir a embalagem somente no momento de sua utilização, em condições assépticas. Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.



|   |                                 |                        |
|---|---------------------------------|------------------------|
|  <p><b>SALDANHA RODRIGUES LTDA.</b><br/>Qualidade e tecnologia em suas mãos.</p> | <b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b> | Documento N°: FTP- 015 |
|   | <b>SERINGA CATETER</b>          | Revisão N°: 01         |
|   |                                 | Data: 22 Mar. 2017     |
|   |                                 | Pág.: 2 de 2           |

## 9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, a temperatura ambiente em local seco e limpo.

## 10. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 11. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 12. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.  
 Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores  
 CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil  
 CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2  
 Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416  
 E-mail: [vendas@seringasr.com.br](mailto:vendas@seringasr.com.br) / [qualidade@seringasr.com.br](mailto:qualidade@seringasr.com.br)  
 FTP disponível em: <http://www.seringasr.com.br/new-site/images/pdf/FTP/FTP-015.pdf>