


1. CARACTERÍSTICAS

A agulha hipodérmica com protetor de segurança SR32 constitui dos seguintes componentes com as respectivas matérias-primas básicas:

- CANHÃO:** Constituído de polipropileno pigmentado (PP), atóxico e inerte.
- JUNÇÃO CÂNULA-CANHÃO:** Adesivo epóxi monocomponente.
- CÂNULA:** Tubo em aço inoxidável, cortado e afiado com dimensões específicas, apresentando bisel trifacetado e lubrificado com óleo de silicone grau médico inerte e atóxico, não interagindo com fluidos utilizados.
- PROTETOR:** Constituído de polipropileno PP natural, translúcido, atóxico e inerte.
- PROTETOR DE SEGURANÇA SR32 (PS):** Constituído de Polipropileno PP, de coloração azul/verde ou conforme coloração do canhão da agulha, atóxico e inerte. Este é um acessório opcional do cliente.

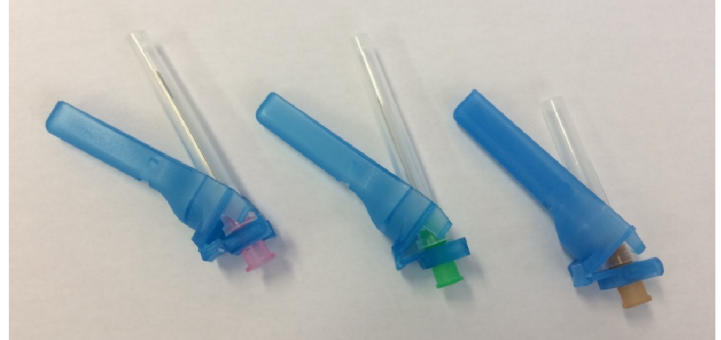

Nota: Produto fabricado conforme requisitos normativos e legais aplicáveis.

2. MEDIDAS / CALIBRES

Sistema Métrico (mm)	Sistema Inglês (pol)	Cor do Canhão
1,20 x 40	18 G1 1/2"	Rosa
0,90 x 20	20 G 3/4"	Amarelo
0,80 x 25	21 G1"	Verde
0,80 x 30	21 G1 1/4"	Verde
0,80 x 40	21 G1 1/2"	Verde
0,70 x 25	22 G1"	Preto
0,70 x 30	22 G1 1/4"	Preto
0,60 x 25	23 G1"	Azul
0,60 x 30	23G1 1/4"	Azul
0,55 x 20	24 G 3/4"	Púrpura Médio
0,45 x 13	26 G 1/2"	Marrom
0,30 x 13	30 G 1/2"	Amarelo

3. REGISTRO MS-ANVISA

- Agulha com PS: **80026180047**

4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL


Produto estéril e embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com código de barras.

5. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Óxido de Etileno.

6. INDICAÇÃO

Agulha hipodérmica indicada para: **injetar, irrigar e aspirar fluidos.**

	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Documento N°: FTP-018
	AGULHA HIPODÉRMICA COM PROTECTOR DE SEGURANÇA SR32	Revisão N°: 00
		Data: 14 Mar. 2017
		Pág.:2 de 2

7. INSTRUÇÕES DE USO

- a) Verificar a integridade do produto antes do uso;
- b) Destacar a unidade do produto da cartela;
- c) Abrir a embalagem através da técnica asséptica (sempre através da pétala);
- d) Insira o canhão no cone da Seringa e faça um movimento de rotação ½ volta;
- e) Realize o procedimento normal de uso da seringa;
- f) É recomendado que o dispositivo de segurança fique aberto para a lateral da escala de graduação da seringa;
- g) Após o procedimento apoie o polegar no dispositivo de segurança e pressione no sentido de travamento;
- h) Descarte o produto contaminado em local apropriado para perfuro cortantes.

8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Produto de uso único. Descartar após o uso;
- O descarte do produto deve seguir os critérios de biossegurança;
- Verifique a integridade da embalagem, não utilize se a mesma estiver violada ou fora do prazo de validade. Abrir a embalagem somente no momento de sua utilização, em condições assépticas. Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.

9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, a temperatura ambiente em local seco e limpo.

10. DESCRIÇÃO COMERCIAL

Agulha Hipodérmica de Uso Único (Indicação do calibre) com dispositivo de segurança, estéril, atóxica, apirogênica, com cânula de aço inox: reta, siliconizada, fixação perfeita ao canhão, bisel curto, trifacetado e afiado permitindo penetração suave, uniforme e atraumática. Canhão em plástico polipropileno rígido, translúcido, com adaptação universal e encaixe seguro a seringa.

11. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

12. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

13. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.
 Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores
 CEP 69058-830– Manaus-AM / Brasil
 CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2
 Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416
 E-mail: vendas@seringasr.com.br / qualidade@seringasr.com.br