


1. CARACTERÍSTICAS

PROTETOR / CAP: Composto de polipropileno (PP), atóxico e inerte transformado pelo processo de injeção termoplástica.

- 1 – Cap para bico seringa oral/enteral: adicionado de pigmento azul.
- 2 – Cap para bico Slip/Lock: componente incolor ou adicionado de pigmento azul.
- 3 – Cap para bico seringa enteral cateter: adicionado de pigmento azul.

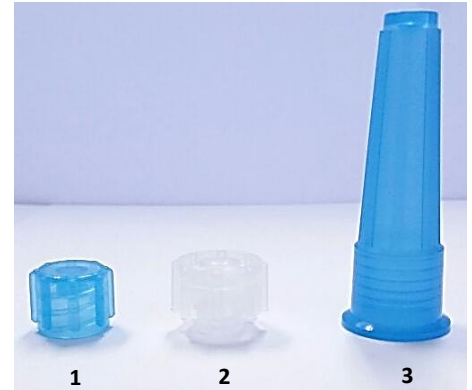

Nota: Produto fabricado conforme requisitos normativos e legais aplicáveis.

2. MODELOS

CAP PARA BICO LUER LOCK / SLIP

CAP PARA BICO CATETER

CAP PARA BICO SERINGA ORAL / ENTERAL

3. REGISTROS MS-ANVISA

- Protetores e Tampas: **80026180044**

4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

O produto é fornecido conforme solicitação do cliente, podendo ir em embalagem primária junto a seringa ou de forma avulsa. Produto pode ser adquirido de forma **estéril** e **não estéril**.

5. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Óxido de Etileno.

6. INDICAÇÃO


Utilizar para vedar o bico das seringas, equipos e conexões tipo macho durante o manuseio, transporte e intervalos das administrações de medicações intermitentes.

7. INSTRUÇÕES DE USO

Utilizar para vedar o bico das seringas, equipos e conexões tipo macho durante o manuseio, transporte e intervalos das administrações de medicações intermitentes.

8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Produto de uso único. Descartar após o uso.
- O descarte do produto deve seguir os critérios de biossegurança.
- Verifique a integridade da embalagem, não utilize se a mesma estiver violada ou fora do prazo de validade. Abrir a embalagem somente no momento de sua utilização, em condições assépticas. Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.

 <p>SALDANHA RODRIGUES LTDA. Qualidade e tecnologia em suas mãos.</p>	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Documento Nº: FTP-020
	PROTETORES E TAMPAS	Revisão Nº: 00
		Data: 24 Fev. 2017
		Pág.:2 de 2

9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, a temperatura ambiente em local seco e limpo.

10. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

11. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

12. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.
 Av.Torquato Tapajós nº 2475 – Flores
 CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil
 CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2
 Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416
 E-mail: vendas@seringasr.com.br / qualidade@seringasr.com.br